

BOND365[®]



NOVINKA



RYCHLÁ LÉČBA – DOBŘE DRŽÍ – MÉNĚ ODPADU

- ➔ **SNADNÁ APLIKACE DŘEVĚNÉHO BLOČKU UNI-BLOC***
- ➔ **DVA KOMPONENTY - A + B, RUČNÍ MÍCHÁNÍ**
- ➔ **DŘEVĚNÝ BLOČEK S DŮVĚROU**

***BOND365™ VÝHRADNĚ PRO POUŽITÍ S DŘEVĚNÍMI BLOČKY
ACCU-BOND® SE DOPORUČUJE PRO PLASTOVÉ BLOČKY**

DOSTUPNÉ V BALENÍ

10 APLIKAČNÍCH SOUPRAV

(VČETNĚ 10-TI DŘEVĚNÝCH BLOČKŮ, 10-TI PAZNEHTNÍCH KALÍŠKŮ, 10-TI MÍCHACÍCH TYČINEK, DRŽÁKU PAZNEHTNÍHO KALÍŠKU)

40 KÚSŮ APLIKACÍ

(DŘEVĚNÉ BLOČKY, PAZNEHTNÍ KALÍŠKY, MÍCHACÍ TYČINKY A DRŽÁKY PAZNEHTNÍCH KALÍŠKŮ SE PRODÁVAJÍ SAMOSTATNĚ)



**COMFORT
HOOF CARE** Inc.
a **SaveCows**[®] company

608.356.3834 or 888.384.3834
www.ComfortHoofCare.com
ComfortHoofCare@SaveCows.com

MATERIÁL POTŘEBNÝ K APLIKACI

POLOŽKA: 36510

BOND365®



QTY 10 - Bond 365 ČÁST A
QTY 10 - Bond 365 ČÁST B



QTY 10 - UNI-BLOC –
DŘEVĚNÝ BLOČEK



QTY 10 - PAZNEHTNÍ
KALÍŠEK



QTY 1 - DRŽÁK
PAZNEHTNÍHO KALÍŠKU



QTY 10 - MÍCHACÍ
TYČINKY

UŽITEČNÉ tipy

JE CHLADNO? PŘED APLIKACÍ UCHOVÁVEJTE ČÁST B V KAPSE A ČÁST A V ZAHŘÍVACÍM SÁČKU. BOND365™ MÁ NEJLEPŠÍ VÝKON V ROZMEZÍ 18-24° C

APLIKACE

KROK 1



CELÝ OBSAH SÁČKU "A"
VYMAČKEJTE DO PAZNEHTNÍHO
KALÍŠKU

KROK 2



CELÝ OBSAH SÁČKU "B"
VYMAČKEJTE DO PAZNEHTNÍHO
KALÍŠKU

KROK 3



OBE ČÁSTI DŮKLADNĚ PROMÍCHEJTE
MÍCHACÍ TYČINKOU PO DOBU
MINIMÁLNĚ 25 SEKUND, LEPIDLO
BOND365 ZMĚNÍ BARVU NA
NEPRŮHLEDNOU.

KROK 4



KDYŽ SE LEPIDLO BOND365 VYJASNÍ,
VLOŽTE DŘEVĚNÝ BLOČEK AŽ NA DNO
SPODNÍ ČÁSTI ŠPIČKY PAZNEHTNÍHO
KALÍŠKU.

KROK 5



NANESTE TENKOU VRSTVU NA
CHODIDLO PAZEHTU A POTÉ
ROZETŘETE ZBÝVAJÍCÍ LEPIDLO NA
DŘEVĚNÝ BLOČEK, V TLOUŠČE 5-7
MM. (V CHLADNÉM POČASÍ
PAZNEHT ZAHŘEJTE.)

KROK 6



UMÍSTĚTE PODKOVU NA
PŘIPRAVENÝ PAZNEHT. PODRŽTE,
DOKUD LEPIDLO BOND365
NEZAČNE TVRDNOUT,
PŘEMÍSTĚTE DŘEVĚNÝ BLOČEK
DLE POTŘEBY. PŘED ZATÍŽENÍM JE
NUTNÉ LEPIDLO BOND365
NECHAT 4 MINUTY VYTVRDNOUT.



VIDEO UKÁZKA NÁZORNÉHO POUŽITÍ.